

INSTRUCCIONES DE USO

El estetoscopio es de doble cabeza, tiene un diafragma grande y uno pequeño y una válvula hermética de tubo.



- 1 Coloque los audífonos en las cavidades auditivas.



- 2 Un suave golpe al diafragma le permitirá saber si esta funcionando correctamente.




- 3 Si usted no escucha el sonido del golpe, gire la cabeza 180° hasta que oiga un clic para colocarlo en la posición adecuada.

- 4 Entonces, golpee una vez más y oirá los sonidos de los golpecillos, lo cual significa que el instrumento está funcionando correctamente.

- 5 ¡Ahora usted puede diagnosticar con el estetoscopio!

- 6 Vuelva a realizar el mismo procedimiento cuando cambie cada una de las piezas.

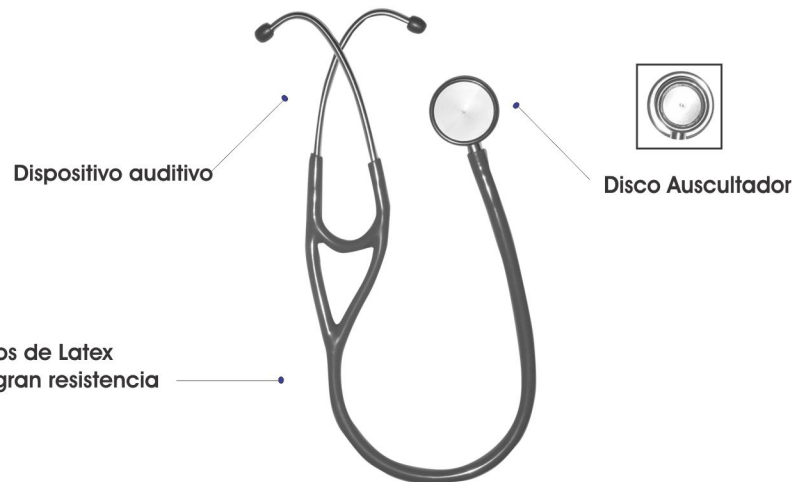

**PRODUCTOS MEDICOS,
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



Estetoscopio profesional Cardiology de Acero Doble Campana Mod. 30K

Consta de Head Frame (Dispositivo Auditivo), tubo de látex, Chest Piece (Disco Auscultador), que le permitirán distinguir claramente las frecuencias bajas y altas del corazón. Viene con 2 olivas de repuesto de diferentes tamaños y un diafragma.

GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

PRECAUCIONES: No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la póliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz