




PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION

# Manual General

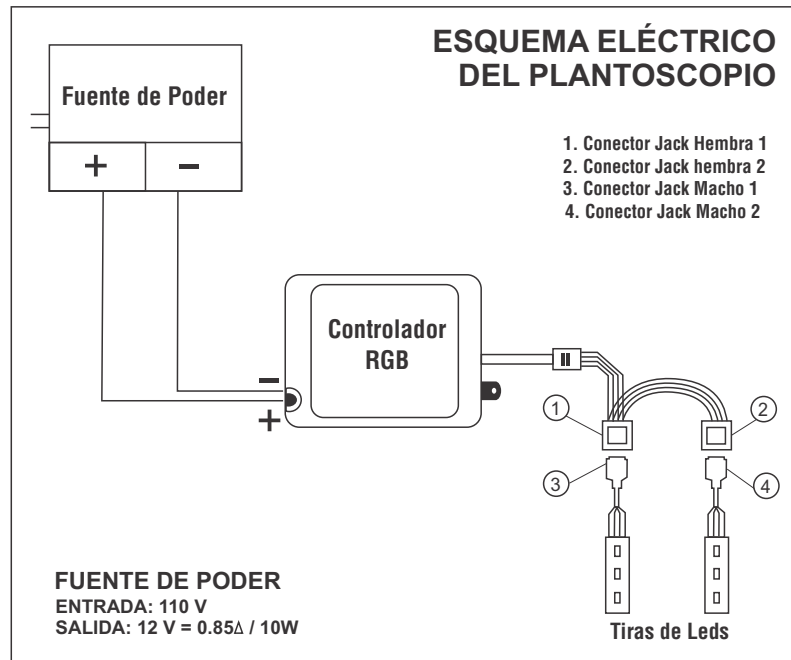

## Plantoscopio de Acrílico con Leds Mod. 904L

### GARANTÍA

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Las partes de uso o desgaste (Lámparas, interruptor, etc.) requieren reemplazo de las piezas acorde al mismo desgaste. Se aplican restricciones.

**PRECAUCIONES:** No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la poliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.

Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Prol. Av. Vallarta 6245 Col. Cd. Granja, Zapopan Jalisco, México  
C.P. 45010 Telefono: (33) 3777 4000 Ventas: 3777 4001 Fax: (33) 3777 4002  
RFC: HGI9711269IA E- Mail: contacto@ortiz.biz

**Servicio a Clientes: 3777-4000**

## FUNCIONES DEL CONTROL

### Funciones principales:

1. Encendido
3. Bajar velocidad de cambios secuenciales
4. Demostración de todas las funciones
5. Aumentar velocidad de cambios secuenciales
6. Hacia arriba para elegir un color de 20 posibles
7. Aumento de brillo
9. Retroceso para elegir un color de 20 posibles
10. Reducción de brillo

### Funciones opcionales

2. Funciones opcionales - Cambios secuenciales.
8. Funciones opcionales - Cambios secuenciales


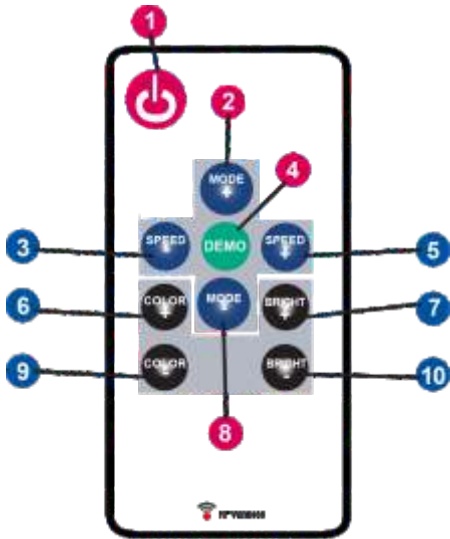


Ilustración 1

## PARTES DEL PRODUCTO:

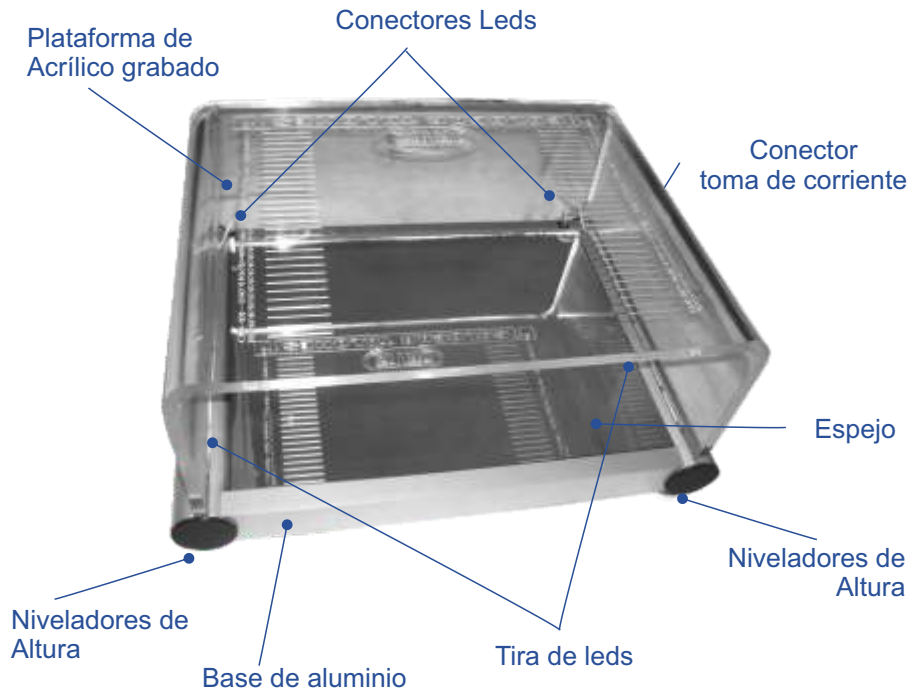

## ¡Precauciones!


A fin de que su Plantoscopio funcione de manera correcta, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

- 1.- Asegurese de que ninguna pieza se encuentre dañada o falte, incluyendo la plataforma de acrílico y los Leds.
2. Mantenga el plantoscopio alejado de polvo, agua y lugares con alta humedad. El polvo y al humedad puede causar cortos circuitos.
3. Asegurese que conecta el cable de alimentación a una toma debidamente conectada a tierra. De otra manera puede causar shock eléctrico.
- 4.- Coloque e instale el plantoscopio en una superficie plana y estable, para evitar un mal funcionamiento y que el paciente pueda caer. Use los niveladores que se ubican en la parte inferior y utilice llave española para ajustarlos.
- 5.- Antes de conectar el plantoscopio, asegurese de que el contacto, el enchufe y el voltaje sean los adecuados (110 volts). De otra manera el plantoscopio puede dañarse.
- 6.- Al utilizar o conectar el plantoscopio se debe tener las manos secas no se debe estar descalzo ni con los pies húmedos
- 7.- El usuario no debe retirar ni manipular los mecanismos de la instalación.
- 8.- Encender con el control y probar las diferentes opciones (Vease ilustración 1).
- 9.- Al limpiar el plantoscopio utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni tampoco un paño húmedo.


**NOTA IMPORTANTE:** Si necesita reparar ésta unidad, dirijase con su distribuidor.

**SOPORTA HASTA 110 KGS. DE PESO**

### INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE ACRÍLICO Y LEDS

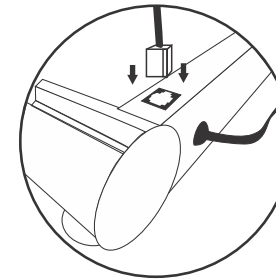

Para cambiar los Leds desconectar su plantoscopio y reemplace los Leds por otros del mismo tamaño y voltaje.

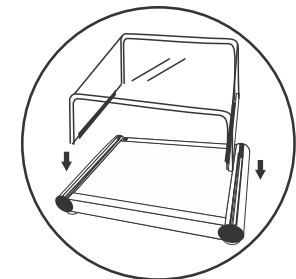

Levantar la plataforma de acrílico sobre la base de aluminio.