



**PRODUCTOS MEDICOS,  
ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION**



**Al final su rampa esta lista para usarse**

**Usted tiene la opción de fijarla al piso usando tres pijas y tres taquetes que irían en tres barrenos que van en la orilla de la rampa**



## **MANUAL PARA RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS**

### **GARANTÍA**

Este Producto está garantizado contra defectos de Fabricación por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Se aplican restricciones.

**PRECAUCIONES:** No se garantiza este producto por mal uso y/o intentos de reparación por parte de personas no calificadas.

Para hacer válida su garantía debe presentar: el empaque, el producto, la poliza vigente y comprobante de compra. Si usted adquirió el producto con cualquier otro distribuidor, haga válida su garantía con el mismo.



Fabricado por: Health Group Industrias de México S.A. de C.V.  
Prol. Av. Vallarta 6245 Cd. Granja Zapopan, Jalisco, México C.P. 45010  
Conmutador: 01 (33) 3777-4000 Ventas: 3777-4001 Fax: 3777-4002 R.F.C. HGI9711269IA  
Web: [www.ortiz.biz](http://www.ortiz.biz) E-mail: [contacto@ortiz.biz](mailto:contacto@ortiz.biz)

**Servicio a Clientes: 3777-4000**



1.- Saque la rampa de su caja



3.- Desenrolle y separe los tubos laterales



2.- Coloque en posición vertical



4. Coloque el primer tubo lateral insertando la rampa en la rendija colocando el gancho enfrente del sujetador



5. Coloque el sujetador sobre el gancho y presione para asegurar



6. Gire la rampa y repita los paso 4 y 5 con el segundo tubo lateral